

EASYCLEAN



Alimentazione	100/230 VAC 50 Hz
Misure	LxPxA 400x285x280 mm
Peso	15 kg

CE Dispositivo Medico di Classe 1 regolamento – 2017/745
Conforme agli standard UNI EN ISO 15883-5

OPTIONALS

- ▶ Lavello Easy Counter
- ▶ Lavello automatizzato Easy Counter Plus
- ▶ Sensore livello decontaminante
- ▶ Kit per la connessione dei canali
- ▶ Kit per il controllo delle proteine



virasect

Virasect S.r.l.

Via calcutta, 44 - 00144 Roma - Italia - Telefono: +39.06.929.47.667 - www.virasect.com

Prodotto da: MEDIQUA S.r.l. - Albano Laziale (Roma) - Italia

EASYCLEAN

SISTEMA AUTOMATICO PER IL LAVAGGIO DEGLI ENDOSCOPI FLESSIBILI



- ▶ Processo standardizzato, tracciato e privo di errori.
- ▶ L'operatore effettua la sola scivolatura dei canali.
- ▶ Il sistema HMI consente di attivare il dispositivo con il solo movimento della mano evitando sia di toccarlo sia eventuali infezioni crociate.
- ▶ Dispositivo da utilizzare con i normali lavelli di lavaggio per il reprocessing ottimale degli endoscopi.



Lo schermo No Touch da 7" Capacitivo permette di eseguire comandi con il solo movimento della mano.

Illuminazione cromatica per ciascuna fase del ciclo. 



Stampante, lettore codici a barre, lettore RFID e porta USB di serie.



Viraclean®, decontaminante dedicato, conforme agli standard UNI ENISO 15883 5.

Tag card o braccialetto in gomma per il riconoscimento dell'operatore.



Tag strumento Associato a ciascun endoscopio.



EASYCLEAN esegue automaticamente

- ▶ Ciclo di deterzione
- ▶ Ciclo di autosanificazione dei circuiti interni
- ▶ Ciclo di prelievo per il campionamento delle proteine
- ▶ Ciclo per il solo test di tenuta



In particolare il ciclo di deterzione esegue

- ▶ **Test di tenuta** all'avvio e durante tutto il ciclo di lavaggio (viene terminato quando l'operatore conferma la fine del ciclo), elimina la possibilità di infiltrazione dello strumento.
- ▶ **Scovolatura manuale** con procedura guidata.
- ▶ **Dosaggio automatico** decontaminante **Viraclean®** utilizzato per la fase di lavaggio. Il dispositivo è dotato di una pompa e un dosatore, altamente resistenti a prodotti chimici, per dosare il corretto quantitativo di prodotto **Viraclean®** da diluire in vasca, riducendo spreco ed errato sovradosaggio.
- ▶ **Ciclo di lavaggio**, programma standard della durata di 5 minuti con test di tenuta automatico durante tutto il ciclo.
- ▶ **Flussaggio dei canali** lavaggio interno dei canali con decontaminante tramite appositi kit di collegamento (optional).
- ▶ **Risciacquo dei canali dello strumento**, con acqua pulita per rimuovere ogni residuo di decontaminante.
- ▶ **Spurgo dei canali** con immissione di aria.
- ▶ Il ciclo può essere programmato per prolungare il tempo di lavaggio.