


Sporicidin® DEC

Disinfettante e detergente plurienzimatico per la decontaminazione e pulizia di strumenti critici e semicritici in ospedali, ambulatori medici ed odontoiatrici.

ATTIVO SU BIOFILM
MICROBICO

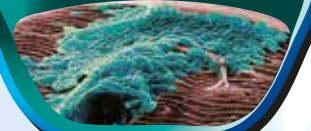

✓ Ampio spettro d'azione

✓ Efficacia anche in presenza di contaminanti organici



Dispositivo medico di classe IIB



Formola concentrata
1 Lt = 200 Lt di soluzione

Compatibilità con leghe di alluminio

Azione anticorrosiva



virasect

Sporicidin® DEC

Soluzione decontaminante, a base di agenti biocidi, miscela plurienzimatica e tensioattivi ad azione sinergica, specifica per la disgregazione del biofilm microbico.

Attività disinfettante battericida, tubercolicida, fungicida e virucida, testata secondo gli standard europei in vigore, conforme agli adempimenti previsti dal titolo X D. Lgs 81/2008 e s.m. Formulazione bilanciata per la decontaminazione e contemporanea deterzione di strumentario medico-chirurgico critico e semicritico, bisturi, specilli, specchietti, frese, leve, pinze per estrazioni e strumenti chirurgici in genere.

Impiego

Soluzione concentrata da usare diluita con acqua di rubinetto nella percentuale del 0,5 % (50 ml per 10 litri di acqua).

Immergere gli **strumenti nel bagno statico** o nelle **vasche ad ultrasuoni automatiche o semiautomatiche** per almeno 5 minuti.

Spettro d'azione

L'attività biocida è riferita alla diluizione d'uso dello 0,5% (5 ml ogni litro di acqua) in condizione di sporco.

Attività	Ceppi test	Tempo
Battericida EN 13727 (Fase 2, Step 1) EN 14561 (Fase 2, Step 2)	E. hirae ATCC 10541 P. aeruginosa ATCC 15442 S. aureus ATCC 6538	1 min 5 min
Tubercolicida EN 14348 (Fase2, Step 1)	Mycobacterium terrae ATCC 15755	15 min
Fungicida (Lieviticida) EN 14562 (Fase 2, Step2) EN 13624 (Fase 2, Step 2)	C. albicans ATCC 10231	5 min 5 min
Virucida EN 14476 (Fase 2, Step 1)	Modified vaccina Virus strain Ankara (ATCC VR-1508) HIV Bovine viral diarrhea virus 1 (RVB-004) - HBV Suid alpha herpes virus 1 (pseudorabies virus) Strain Kaplan-HCV	15 min



virasect

Virasect s.r.l.

Via Calcutta, 44 - 00144 Roma - Italia

Tel.: +39 0692947667

www.virasect.com